

Indications

Soins postopératoires de chirurgie de l'épaule (prothèse, coiffe des rotateurs, butée...).
Traumatisme de l'épaule. Effets antalgique, anti-oedémateux, antihémorragique.

Contre-indications

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud ou autres maladies angiospastiques, artérite, cryoglobulinémie, drépanocytose, artériosclérose, diabète, polyarthrite, troubles de la sensibilité cutanée ou d'hypercoagulation, maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale.

Risques à l'utilisation et précautions d'emploi

Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.).

Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. Il est impératif de vérifier l'intégralité et l'intégrité des éléments du kit avant son utilisation. Ne pas utiliser en cas de dégradation.

Des facteurs peuvent favoriser le risque de brûlure cutanée (patients dénutris, tabagisme excessif, diabétiques insulino-dépendants, ou encore les personnes ayant une peau fragile) : une surveillance médicale étroite est alors préconisée.

Le pack de froid ne doit jamais être mis en contact direct avec la cicatrice ou la peau. Utiliser systématiquement un tissu.

Le pack de froid doit être souple et ne pas présenter de givre avant utilisation.

Ne pas chauffer ou réchauffer le pack de froid.

Ne pas percer le pack de froid.

En cas de fuite du gel : manipuler le dispositif avec des gants, ne pas ingérer le gel, ne pas verser le gel dans un système d'évacuation relié aux égouts, ni dans un cours d'eau.

Ne pas jeter le dispositif dans la nature, ni avec les ordures ménagères. La mise au rebut se fait avec les déchets industriels spéciaux, en déchetterie.

En cas de contact direct du gel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau froide.

Contactez votre médecin en cas d'irritation persistante.

Ne pas laisser à la portée des enfants et des personnes inaptes à l'utilisation de ce dispositif.

Entretien

Le gilet de contention Should'ICE est lavable à la main avec un savon doux. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas sécher en machine et ne jamais repasser.

Le pack de froid est lavable à la main avec un savon doux. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Ne pas immerger dans un bain détergent désinfectant.

Si besoin, pulvériser une solution détergente désinfectante (ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes). Laisser sécher à plat à l'air libre.

Pour plus d'informations, contacter la société Orthonov ou consulter le site www.orthonov.com



AVERTISSEMENT



Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation.

En cas de douleur, de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre professionnel de santé habilité [pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.], et contacter la société Orthonov : 01 60 13 65 73 ou via le site www.orthonov.com

En cas de réaction grave, contacter le fabricant et l'autorité compétente en France.



Dispositif médical



Conforme aux exigences de l'Union Européenne



Tracabilité produit



Un seul patient à usage multiple



Référence



Durée optimale d'utilisation



Température limite



Lire la notice d'utilisation



Respecter les consignes d'utilisation



Sans phtalates



Sans latex



Ne pas ouvrir avec un objet coupant



Lavage à la main



Ne pas repasser



Ne pas javelliser



Séchage en machine ou à sec interdit



Dangereux pour l'environnement



3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
Tél.: 01 60 13 65 73 - Fax: 01 69 15 06 37 - Courriel: contact@orthonov.com
www.orthonov.com

Notice d'utilisation de Gilet de contention Should'ICE 2023/08/V4

NOTICE
D'UTILISATION

Excell'ICE

Gilet de contention **Should'ICE** + Pack de Cryothérapie



FR



EN

Composition du colis :

Réf. ORT40EPAU-U-S/M : Tour de poitrine < 100 cm
ORT40EPAU-U-L/XL : Tour de poitrine ≥ 100 cm



1 sac congélation



1 épaulière



1 sangle coudière



1 pack de froid



1 sangle
d'avant-bras



1 valisette

Attelle d'immobilisation coude-au-corps



1

Pour une épaule droite, passer directement à l'étape 5.
Pour une épaule gauche, suivre d'abord les étapes 2 à 4.



2

Epaule gauche uniquement : Visualiser la couture (repère R), et placer les doigts à l'intérieur de l'épaulière.



3

Epaule gauche uniquement : Retourner l'épaulière sur elle-même, de manière à l'inverser.




10

Passer la sangle de maintien par-dessus l'épaulière.



11

Attraper la sangle de maintien derrière le dos.

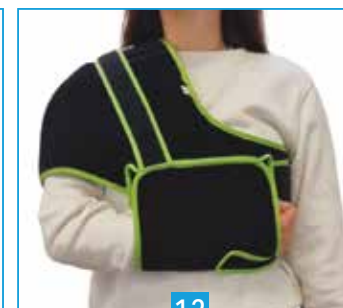

12

La fixer sous la sangle d'avant-bras



4

Epaule gauche uniquement : Retirer le velcro double-face derrière la sangle arrière (bord arrondi), et le fixer de l'autre côté.



5

Placer l'épaulière sur l'épaule à immobiliser (exemple ici côté droit) en maintenant la sangle thoracique avec la main.




6

Attraper la sangle arrière dans le dos avec l'autre main, et la fixer sur la sangle thoracique grâce au velcro double-face.



13

Fixer la sangle coudière sous la sangle d'avant-bras, puis recouvrir le coude.

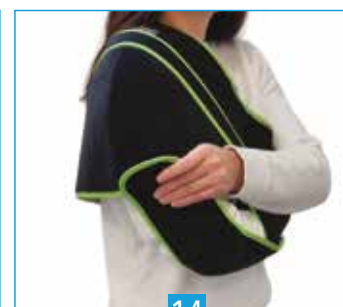


14

Placer le coude dans le creux de la sangle coudière, puis fixer le velcro sur le côté de l'épaulière.




15

Ajuster si nécessaire le positionnement du velcro de la sangle coudière sous la sangle d'avant-bras.

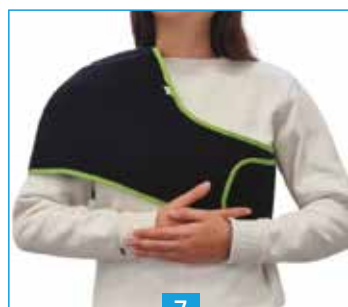

7

L'épaulière est correctement mise en place.

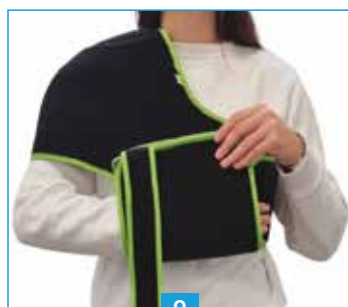

8

Placer et centrer le poignet dans la sangle d'avant-bras.



9

Fixer la sangle d'avant-bras sur la sangle thoracique, de manière à ce que le poignet ne soit pas en-dessous du coude (trait rouge).

Séance de cryothérapie



16

Après 8h de congélation (entre -18 et -22°C) dans le sachet hermétique, sortir le pack de froid et répartir le gel si nécessaire.



17

Retirer toute l'attelle. Placer le pack de froid dans l'épaulière (le liseré vert vers le bas).



18

Remettre l'attelle en place en suivant les étapes 5 à 15. Retirer le pack de froid après 20 minutes.