

Excell'ICE

## Dispositivo universale per crioterapia compressiva del ginocchio

### Composizione della confezione

Rif. ORT40PACK-G



Anteriore impacco freddo



Posteriore impacco freddo



Pompa manuale



Valigia



Sacchetto per congelatore



Lycra

### ISTRUZIONI PER L'USO



1 Inserire gli impacchi freddi nel sacchetto ermetico e asciutto prima di metterli nel congelatore. Dopo un congelamento di 8 ore (tra -18 e -22°C), rimuovere gli impacchi freddi e distribuire il gel, se necessario.



2 Posizionare lo zaino freddo posteriore su una superficie piana. Le cinghie più lunghe devono essere utilizzate per la coscia.



3 Indossare la lycra e posizionare la gamba in modo che l'impacco freddo posteriore sia centrato dietro il ginocchio.



4 Posizionare l'impacco freddo anteriore sul ginocchio. Il bordo verde deve trovarsi sulla coscia.



5 Ripiegare la borsa frigo posteriore su quella anteriore e fissarla con il velcro. Se necessario, utilizzare le prolunghie



6 Da questo momento in poi, la gamba deve rimanere dritta, con la caviglia sollevata sopra il ginocchio, se possibile.



7 Girare il rubinetto su 0 e avvitare la pompa. Gonfiare (non superare le 15 pressioni). Ruotare il rubinetto su F e svitare la pompa.



8 Dopo 20 minuti, girare il rubinetto su 0 per svuotare l'aria e allentare le cinghie. Riposizionare gli impacchi freddi nella borsa e poi nel congelatore.

## Indicazioni per l'uso

Trattamento post-operatorio, trattamento antalgico, lesioni sportive (distorsioni, strappi, ecc.), dopo le sedute di riabilitazione, ecc.

## Controindicazioni

Allergia al freddo, insensibilità al freddo, sindrome di Raynaud, crioglobulinemia, arterite, diabete, poliartrite...

## Precauzioni per l'uso

Il produttore non garantisce che l'uso di questo prodotto non prevenga lesioni. Alcuni fattori possono aumentare il rischio di ustioni cutanee (pazienti malnutriti, forti fumatori, diabetici insulino-dipendenti o persone con pelle fragile): si raccomanda pertanto uno stretto controllo medico.

Questo dispositivo medico deve essere utilizzato come prescritto dal chirurgo o dal medico, o come raccomandato da un operatore sanitario debitamente autorizzato (farmacista, fisioterapista, ortesista).

Gli impacchi freddi non devono mai essere posti a diretto contatto con la pelle. Non forare gli impacchi freddi. In caso di perdite, non versare il gel in un sistema di drenaggio collegato alla rete fognaria o in un corso d'acqua. Contattare Orthonov o consultare [www.orthonov.com](http://www.orthonov.com)

Se il gel viene a contatto diretto con la pelle, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Contattare il medico se l'irritazione persiste.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli anziani che non sono in grado di utilizzare questo dispositivo.

## Manutenzione

Gli impacchi freddi possono essere lavati a mano con sapone neutro. Non immergerle in un bagno detergente disinfettante, ma spruzzarle con una soluzione detergente disinfettante (detergente disinfettante per superfici elevate ANIOS). Assicurarsi che il rubinetto sia in posizione F.

### **ATTENZIONE**

In caso di dolore, gonfiore, sensazioni insolite, reazioni infiammatorie o allergiche, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo medico e consultare la prima possibile il medico, il chirurgo o un operatore sanitario autorizzato (farmacista, fisioterapista, ortesista) e contattare Orthonov : +33 1 60 13 65 73 o [www.orthonov.com](http://www.orthonov.com)

In caso di contatto con il gel, sciacquare abbondantemente con acqua fredda e consultare il medico.



Dispositivo medico



Marchio CE



Tracciabilità del prodotto



Uso multiplo per un singolo paziente



Codice lotto



Data di scadenza



Limite di temperatura



Consultare le istruzioni per l'uso



ATTENZIONE consultare la documentazione di accompagnamento



Nessuno ftalati



Nessun lattice



Non tagliare



Lavare a mano



Non stirare



Non candeggiare



Asciugatura a secco



Percicoloso per l'ambiente



3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France  
Telefono: +33 1 60 13 65 73 Fax: +33 1 69 15 06 37 Email: [contact@orthonov.com](mailto:contact@orthonov.com)  
[www.orthonov.com](http://www.orthonov.com)