



Universal komprimerende kryoterapienhet for kne

Innhold

Referanse. ORT40PACK-G



Kuldepakninger foran



Kuldepakning bak



Manuell pumpe



Koffert



Frysepose



Lycra

KULDEPAKNING



1
Legg kuldepakningene i den lufttette, tørre fryseposen før de legges i fryseren.



2
Etter åtte timers nedfrysing (mellom -18 og -22 °C) tar du kuldepakningene ut og fordeler gelen om nødvendig.



3
Plasser den bakre kuldepakningen på en flat overflate. De lengste stroppene skal brukes på låret.



4
Ta på lycrastoffet og plasser benet slik at baksiden av kneet ligger midt på den bakre kuldepakningen sett ovenfra.



5
Plasser den fremre kuldepakningen foran på kneet. Den grønne kanten må være på låret.



6
Brett ned den bakre kuldepakningen slik at den overlapper den fremre kuldepakningen, og fest borrelåsen. Bruk forlengelsene om nødvendig.



7
Heretter må benet holdes rett, ankelhøyere enn kneet hvis mulig.



8
Vri tappen til O og skru på pumpen. Pump opp (ikke mer enn 15 trykk). Vri tappen til F og skru av pumpen.



9
Etter 20 minutter vrir du tappen til O-stilling for å slippe ut gjenværende luft. Løsne stroppene. Tørk av kuldepakningene, legg dem tilbake i posen og oppbevar dem i fryseren.

Indikasjoner for bruk

Postoperativ behandling av knekirurgi, idrettstraumatologi (forstuing, rift osv.) etter rehabiliteringsøkt. Smertestillende, anti-ødematøs, anti-hemorragisk effekt.

Kontraindikasjoner

Allergi mot kulde, ufølsomhet for kulde, Raynauds syndrom eller andre vasospastiske sykdommer, arteritt, kryoglobulinemi, sigdcellesykdom, arteriosklerose, diabetes, polyartritt, forstyrrelser i hudsensitivitet eller hyperkoagulasjon, perifere vaskulære sykdommer som forårsaker iskemi eller dårlig blodsirkulasjon lokalt.

Risikoen ved bruk og forholdsregler ved bruk

Ette medisinske utstyret må brukes slik legen har foreskrevet eller i henhold til anbefalinger for bruk fra autorisert helsepersonell (farmasøyt, fysioterapeut, ortopediingeniør osv.).

Produsenten gir ingen garantier for at bruk av dette produktet vil forebygge skade. Det er svært viktig å kontrollere at settet er fullstendig og at alle elementene er på plass før bruk. Må ikke brukes hvis det er skadet. Faktorer som kan øke risikoen for hudforbrenninger (underernærte pasienter, overdreven røyking, insulinavhengige diabetikere eller personer med ømtålig hud): nøye medisinsk overvåking anbefales.

Kuldepakninger skal aldri være i direkte kontakt med arret eller huden. Bruk det medfølgende hypoallergene lycrastoffet systematisk.

Kuldepakninger skal være myke og frostfrie før bruk.

Kuldepakninger må ikke varmes opp.

Overhold det angitte antallet trykk for å pumpe opp pakningen. Hvis det oppstår en prikkende følelse i kroppsdelen, må pakningen fjernes og deflateres umiddelbart.

Stikk ikke hull på kuldepakningene eller den manuelle pumpen og tilkoblingsrøret.

Ved lekkasje av gel: bruk hansker ved håndtering av enheten, gelen må ikke inntas eller helles ut i et avløpssystem koblet til kloakken, eller i et vannløp.

Kast ikke enheten i naturen eller sammen med husholdningsavfall. Avhendes sammen med spesialavfall fra industri på en gjenvinningsstasjon.

Dersom gelen kommer i direkte kontakt med hud, skylld umiddelbart med rikelige mengder kaldt vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.

Oppbevares utilgjengelig for barn og personer som ikke er egnet til å bruke denne enheten.

Rengjøring

Kuldepakninger og lycra kan vaskes for hånd med mild såpe. De må ikke vaskes i maskin, og bruk aldri klor. De må ikke senkes i et desinfiserende bad med rengjøringsmiddel.

Spray om nødvendig på en desinfiserende rengjøringsløsning (AINOS desinfiserende rengjøringsmiddel for høye overflater). Plasser alltid tappen i posisjon F. La den lufttørke og ligge flat.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Orthonov eller besøke nettsiden www.orthonov.com

⚠ ADVARSLER ⚠

Ette medisinske utstyret er et regulert helseprodukt i henhold til denne forskriften, CE-merkingen. Les denne brukerveiledningen grundig før bruk og følg anbefalingene for bruk.

Ved smerter, hevelser, uvanlige fornemmelser, inflammatorisk eller allergisk reaksjon må du øyeblikkelig slutte å bruke produktet og kontakte autorisert helsepersonell snarest (farmasøyt, fysioterapeut, ortopediingeniør osv.) og kontakte Orthonov: +33 1 60 13 65 73 eller www.orthonov.com

Ved alvorlig reaksjon, kontakt produsenten og vedkommende myndighet i Frankrike.



Medisinsk utstyr



CE-merke



Produktets sporbarhet



Enkeltpasient, flerbruk



Batchkode



Siste forbruksdag



Temperaturrense



Se brukerveiledningen



ADVARSEL
Produsentens advarsel. Les de medfølgende dokumentene



Ingen Italater



Ingen lateks



Må ikke skjæres



Vaskes for hånd



Må ikke klorbehandles



Må ikke klorbehandles



Må ikke tørkes i tørketrommel



Miljøfarlig



3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
E-post: contact@orthonov.com
Telefon: +33 1 60 13 65 73 - Faks: +33 1 69 15 06 37
www.orthonov.com