



Excell'ICE

Universal knäkomprimerande kryoterapienhet

Innehåll

Referens. ORT40PACK-G



KYLFÖRPACKNING



Placera kylförpackningarna i den lufttåta torra fryspåsen innan du lägger dem i frysen.



Efter åtta timmar i frysen (mellan -18 och -22°C) ska man ta ut kylförpackningarna och vid behov fördela gelen.



Placera den bakre kylförpackningen på en platt yta. Den längsta remmen ska placeras på låret.



Lägg på lycraduken och placera benet så att den bakre delen av knäet centreras på den bakre kylförpackningen sett ovanifrån.



Placera den främre kylförpackningen på knäets framsida. Den gröna kanten måste vara på låret.



Vik ner den bakre kylförpackningen så att den överlappar den främre kylförpackningen och fäst kardborren.

Använd vid behov förlängningarna.



Från och med nu måste benet förbli rakt, och om möjligt ska ankeln vara ovanför knäet.



Vrid kranen till O och skruva på pumpen. Blås upp (överstig inte 15 tryckningar). Vrid kranen till F och skruva loss pumpen.



Efter 20 minuter ska man vrida kranen till O-läget för att släppa ut återstående luft. Lossa på remmarna. Torka av och placera kylförpackningarna i påsen och lagra dem sedan i frysen.

Indikationer för användning

Postoperativ vård vid knäoperationer, idrottstraumatologi (vrickningar, rivningar osv.), efter rehabilitering. Smärtstillande, anti-ödematösa och anti-hemorragiska effekter.

Kontraindikationer

Allergi mot kyla, okänslighet mot kyla, Raynauds syndrom eller andra vasospastiska sjukdomar, arterit, kryoglobulinemi, sicklecellsjukdom, åderförkalkning, diabetes, polyartrit, störningar av hudkänslighet eller hyperkoagulation, perifera kärlsjukdomar som orsakar ischemi eller svag lokal blodcirkulation.

Risker och försiktighetsåtgärder vid användning

Denna medicinska utrustning måste användas i enlighet med medicinskt recept eller enligt rekommendationerna för användning från auktoriserad vårdpersonal (farmaceut, sjukgymnast, ortotist osv.).

Tillverkaren garanterar inte att användningen av denna produkt inte kommer att förhindra skada. Det är absolut nödvändigt att kontrollera fullständigheten och integriteten hos delarna i satsen före användning. Använd inte om de är skadade. Faktorer kan öka risken för brännskador på huden (undernärda patienter, överdriven rökning, insulinberoende diabetiker eller till och med personer med känslig hud): noggrann medicinsk övervakning rekommenderas.

Kylförpackningar ska aldrig vara i direkt kontakt med ärr eller hud. Använd systematiskt den hypoallergena lycra som medföljer.

Kylförpackningar bör vara mjuka och fria från frost före användning.

Värm inte upp kylförpackningar.

Observera det tryckantal som anges för att blåsa upp förpackningen. Om stickningar uppstår i kroppsdelen, avlägsna och töm förpackningen omedelbart.

Punktera varken kylförpackningarna, den manuella pumpen eller dess anslutna rör.

Vid gelläckage: hantera produkten med handskar, svälj inte gelen, håll inte ut gelen i ett dräneringssystem anslutet till avlopp eller i ett vattendrag.

Kasta inte produkten i naturen eller tillsammans med hushållsavfall. Kassering ska göras tillsammans med särskilt industriavfall på en återvinningscentral.

Om gelen kommer i direkt kontakt med huden, skölj omedelbart och rikligt med kallt vatten. Uppsök läkare om irritation kvarstår.

Förvaras utom räckhåll för barn och personer som inte är lämpliga att använda denna produkt.

Rengöring

Kylförpackningar och lycra kan rengöras för hand med en mild tvål. Tvätta inte i maskin och använd aldrig blekningsmedel. Sänk inte ned i ett desinficerande rengöringsbad.

Sprayas vid behov med en desinficerande rengöringslösning (ANIOS desinfektionsmedel för höga ytor). Placera alltid kranen i F-position. Lufttorka och låt ligga plant.

För mer information kan du kontakta Orthonov eller besöka webbplatsen www.orthonov.com

⚠ VARNINGAR ⚠

Denna medicintekniska produkt är en reglerad hälsoprodukt i enlighet med denna förordning, CE-märkningen. Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och följ rekommendationerna för användning.

I händelse av smärta, svullnad, ovanliga förnimmelser, inflammation eller allergiska reaktioner, sluta omedelbart använda den medicintekniska produkten och kontakta auktoriserad sjukvårdspersonal så snart som möjligt (farmaceut, sjukgymnast, ortotist, osv.), och kontakta Orthonov på +33 1 60 13 65 73 eller via www.orthonov.com I händelse av en allvarlig reaktion, kontakta tillverkaren och relevant myndighet i Frankrike.



Medicinteknisk produkt



CE-märkning



Produktspårbarhet



Flergångs användning för en patient



Batchkod



Sista användningsdag



Temperaturgräns



Se bruksanvisning



VARNING
Tillverkaren rekommenderar att man granskar medföljande dokument



Inga Italater



Ingen latex



Skär ej



Tvättas för hand



Stryk ej



Blek ej



Torktumla ej



Farlig för miljön